


Anapen[®] adrénaline

Mode d'emploi



❶ Enlevez le bouchon noir protecteur de l'aiguille **a**. Ce bouchon est fixé à une gaine grise protégeant l'aiguille et son retrait peut nécessiter une force raisonnable.

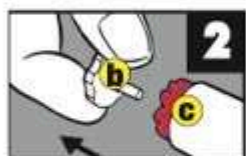

❷ Enlevez le bouchon noir de sécurité **b** recouvrant le bouton rouge déclencheur d'injection **c**.



❸ Appuyez fermement le dispositif sur la face extérieure de la cuisse selon le schéma, puis appuyez sur le bouton rouge déclencheur **c**. Si nécessaire, l'injection peut être pratiquée à travers le vêtement lorsqu'il est en tissu léger.



❹ Maintenez l'auto-injecteur Anapen en position **pendant 10 secondes** (afin de permettre l'injection de la dose complète d'adrénaline). **Massez doucement le site d'injection.**

Après utilisation, remettez le bouchon noir protecteur de l'aiguille **a** en place et rapportez le médicament à votre pharmacien ou à votre médecin afin qu'il soit mis au rebut dans de bonnes conditions de sécurité.

La formation des patients et de leur entourage à la pratique d'injection et à la reconnaissance rapide des signes de réactions cliniques graves est indispensable. Un dispositif réutilisable d'apprentissage à l'utilisation du stylo auto-injecteur mais sans aiguille et sans principe actif est disponible : **Anapen Trainer**.