



Mode d'administration

JEXT autoinjecteur

**Si vous n'êtes pas en état de le faire,
demandez l'aide de quelqu'un.**

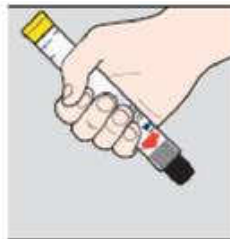

- ↳ Tenez le stylo injecteur JEXT dans votre main dominante (celle que vous utilisez pour écrire) avec votre pouce le plus près possible du bouchon jaune

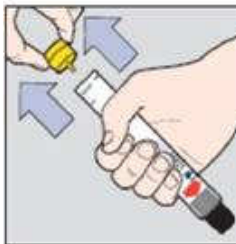

- ↳ Retirez le bouchon jaune avec l'autre main.



- ↳ Placez l'extrémité noire du stylo injecteur contre la face extérieure de la cuisse, tenez l'injecteur à angle droit de la cuisse (environ 90°).



- ↳ Pressez fermement l'extrémité noire contre l'extérieur de la cuisse jusqu'à ce que vous entendiez le déclic confirmant le début de l'injection, maintenez le en position. Tenez fermement l'injecteur en place contre la cuisse pendant 10 secondes (comptez lentement jusqu'à 10) puis retirez. L'extrémité noire sort automatiquement pour recouvrir l'aiguille



- ↳ Massez la zone d'injection pendant 10 secondes.
- ↳ Appeler le 144 après toute injection ou consultez immédiatement un service médical d'urgence